

# ProCare

## Dent 10 MA



### Reinigingsmiddel

Mildalkalisch, vloeibaar concentraat met tensiden. Voor de machinale behandeling van tandheelkundige instrumenten, inclusief hand- en hoekstukken, in reinigings- en desinfectieautomaten van Miele Professional.

ProCare Dent 10 MA ondersteunt de verwijdering van organische verontreinigingen, zoals bloed en speeksel, en voorkomt dat deze verontreinigingen opnieuw neerslaan. Wij raden u aan om grove resten van composieten, cement en afdrukmasse te verwijderen, voordat deze stoffen uitharden.


### Kwaliteitskenmerk

ProCare Dent 10 MA voldoet aan de eisen van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG, appendix I. **CE**

### Producteigenschappen

- Veilig voor het materiaal
- Controleer vooraf of spoelgoed van geëloxeerd aluminium bestand is tegen het middel
- Bevat alkaliën en tensiden.

ProCare Dent 10 MA is uitsluitend voor professioneel gebruik.

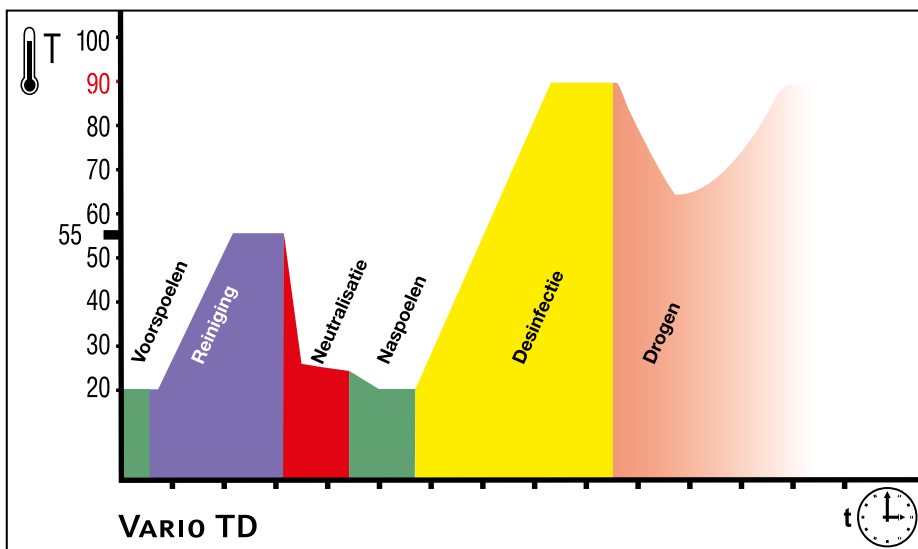

### Procesverloop varioTD

- Voorspoelen met koud water om grove verontreinigingen (bijvoorbeeld bloed) te verwijderen
- Reinigen met ProCare Dent 10 MA op 55°C (doseertemperatuur 40°C); voor een enzymatische reiniging moet een programmawijziging worden uitgevoerd
- Neutraliseren
- Tussenspoelen met koud water
- Thermische desinfectie op 93°C/5 min. houddijd, met naspoelen
- Drogen

### Toepassing en dosering

Miele ProCare Dent 10 MA is afgestemd op het procesverloop van de reinigings- en desinfectieautomaten van Miele Professional.

- Het middel kan nauwkeurig en economisch met een doseerpomp worden gedoseerd
- Concentratie:
  - Mildalkalische reiniging met tensiden: 3 ml/l bij een reinigingstijd < 10 minuten, reinigingstemperatuur 55°C
  - Enzymatische reiniging: 5 ml/l bij een reinigingstijd > 10 minuten, reinigingstemperatuur 45°C - 50°C
- Programmakeuze: varioTD

De gebruikte oplossing moet volledig met water worden weggespoeld. Tijdens het varioTD-programma gebeurt dit vanzelf. De reinigings- en desinfectieautomaat moet wel correct worden gebruikt (spoelgoed goed inruimen, etc.). Ter verificatie wordt de verhoging van de geleidbaarheidswaarde gemeten tijdens het laatste spoelen bij de ingebruikneming of bij routineonderhoud aan de reinigings- en desinfectieautomaat. Miele adviseert het gebruik van gedemineeraliseerd water tijdens het laatste spoelen. Hiermee worden afzettingen en watervlekken vermeden en wordt geëloxeerd aluminium beschermd.

### Let op!

- Niet met andere producten mengen.
- Neem vóór gebruik van een ander middel eerst contact op met Miele.
- De behandeling moet volgens de Wet op de medische hulpmiddelen worden uitgevoerd met geschikte, gevalideerde processen.
- Houdt u zich aan de behandelingsadviezen van de instrumentenfabrikant, overeenkomstig de eisen van DIN EN ISO 17664.
- Houdt u zich aan de gebruiksaanwijzingen van de reinigings- en desinfectieautomaten van Miele Professional.

# ProCare

## Dent 10 MA




### Technische gegevens

- Dichtheid (20°C): ca. 1,1 g/cm<sup>3</sup>
- pH-waarde (bepaald in gedemineraliseerd water, 20°C) 3 tot 5 ml/l: ca. 10,6 tot 10,7

### Bestanddelen van reinigingsmiddelen volgens de EG-verordening 648/2004 betreffende detergentia

- < 5 % niet-ionische en anionische tensiden
- Enzymen

### Opslagcondities

- Aan te houden opslagtemperatuur: 0°C tot 25°C
- Bij correcte opslag tot 2 jaar te gebruiken
- Te gebruiken tot: zie opdruk op het etiket achter het symbool 

### Waarschuwingen en veiligheidsinformatie

- Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de EG-veiligheidsinformatiebladen. Deze vindt u onder [www.miele-professional.be](http://www.miele-professional.be) / [www.miele-professional.nl](http://www.miele-professional.nl).

Verwijder lege reservoirs volgens de voorschriften (de reservoirs moeten leeg en afgesloten zijn). Voor de verwijdering van resthoeveelheden: zie het veiligheidsinformatieblad.

De gegevens uit dit document zijn gebaseerd op de thans beschikbare kennis en ervaring. Dit betekent niet dat de gebruiker geen eigen tests en onderzoeken hoeft uit te voeren. Juridisch bindende garanties ten aanzien van bepaalde eigenschappen kunnen niet uit de gegevens worden afgeleid.

### Leverbare verpakkingseenheid en toebehoren

Aanduiding	reservoir	materiaalnummer
ProCare Dent 10 MA	5 l-reservoir	9 313 850
Sleutel	voor 5 l- en 20 l-reservoirs	9 066 810

### Contact :

N.V. Miele België  
Z.5 Mollem 480  
Hof te Bollebeeklaan 9  
1730 Mollem (Asse)  
Tel. +32 (0) 2 451.15.40  
[infopro@miele.be](mailto:infopro@miele.be)  
[www.miele-professional.be](http://www.miele-professional.be)

Miele Nederland B.V.  
Miele Professional  
De Limiet 2  
4131 NR Vianen  
Tel. +31 (0) 347 37 88 84  
[professional@miele.nl](mailto:professional@miele.nl)  
[www.miele-professional.nl](http://www.miele-professional.nl)



Chemische Fabrik  
Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlhagen 85  
20539 Hamburg  
[www.drweigert.de](http://www.drweigert.de)