

## ProCare Dent 30 C



### Neutralisatiemiddel

#### Gebruik:

Vloeibaar concentraat, zuur, op basis van citroenzuur. Voor machinale behandeling van tandheelkundige instrumenten, inclusief transmissie-instrumenten in Miele Professional thermodesinfectoren.

Het gebruik van *ProCare Dent 30 C* wordt in het bijzonder aanbevolen wanneer instrumenten niet mogen worden herverwerkt met een neutralisatiemiddel met fosforzuur (bv. transmissie-instrumenten).

#### Kwaliteitskenmerk:

*ProCare Dent 30 C* voldoet aan de voorschriften vanuit de wetgeving voor medische hulpmiddelen. **CE MD**

Als zich met dit product een ernstig incident voordoet, moet dit aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit worden gemeld.

#### Producteigenschappen:


- Heel geschikt voor de meeste materialen
- Vrij van tensiden

#### Toepassing en dosering:

Miele *ProCare Dent 30 C* is afgestemd op de procedures in thermodesinfectoren van Miele Professional.

- Het middel kan nauwkeurig en economisch met een doseerpomp worden gedoseerd.
- Let op de zuurbestendigheid van het spoelgoed en de afvoerleidingen.
- Gebruik geschikte doseertoestellen voor de dosering.
- Concentratie: 1 ml/l
- Programmakeuze: Vario TD

#### Programmaverloop:

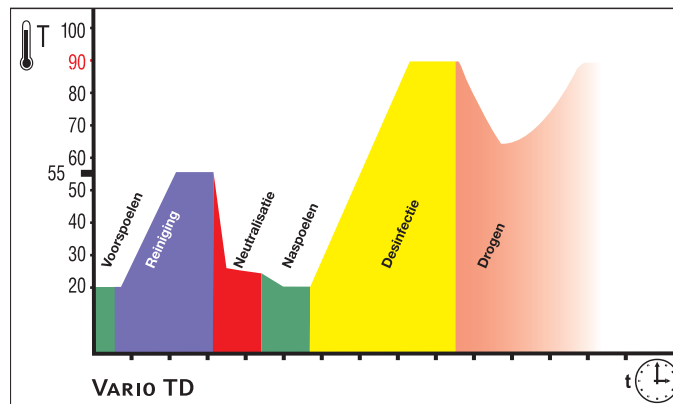

#### Procesverloop Vario TD:

- Voorspoelen met koud water om grove vervuiling (bv. bloed) te verwijderen
- Reinigen
- Neutraliseren met *ProCare Dent 30 C*
- Tussenspoelen met koud water
- Thermische desinfectie bij 93 °C voor 5 minuten
- houdtijd in de laatste spoeling
- Drogen

De te gebruiken oplossing kan volledig met water worden afgespoeld. Bij gebruik in thermodesinfectoren van Miele Professional wordt dit gegeven door het Vario TD-programma bij correct gebruik (b.v. juiste sortering en belading van het spoelgoed). Verificatie vindt plaats door meting van de geleidingsstijging in de laatste spoelcyclus tijdens de inbedrijfstelling of het routineonderhoud van de thermodesinfecteur.

Het gebruik van volledig gedemineraliseerd water in de laatste spoeling wordt aanbevolen om aanslag en watervlekken te voorkomen en om geanodiseerd aluminium te beschermen.

#### Let op!

- Niet met andere producten mengen.
- Neem voor vervanging van het product contact op met de Miele Service.
- De behandeling dient met geschikte, gevalideerde processen te worden uitgevoerd volgens de wetgeving voor medische hulpmiddelen en geldende regels.
- Neem de behandelingsaanbevelingen van de fabrikant van het medisch hulpmiddel overeenkomstig de eisen van DIN EN ISO 17664 in acht.
- De bedieningsinstructies van de thermodesinfectoren van Miele Professional moeten in acht worden genomen.
- Alleen voor commerciële toepassingen.

## ProCare Dent 30 C



### Neutralisatiemiddel


#### Technische gegevens:

- Dichtheid (20 °C): ca. 1,2 g/cm<sup>3</sup>
- pH-waarde (bepaald in gedemineraliseerd water, 20 °C) 1 ml/l: ca. 3,0

#### Bestanddelen van reinigingsmiddelen volgens de EG-verordening 648/2004 betreffende de detergentia:

- Conserveringsmiddel (2-Octyl-2H-isothiazol-3-one)

#### Opslaginstructies:

- De aan te houden opslagtemperatuur: is: -3 °C tot 30 °C
- Bij correcte opslag 3 jaar te gebruiken.
- Voor de houdbaarheidsdatum: zie de opdruk op het etiket achter het symbool .

Na verloop van tijd kunnen er afwijkingen in de kleur van de opgeslagen originele gesloten verpakkingen optreden. De toepassingstechnische eigenschappen worden daardoor niet beïnvloed.

#### Waarschuwingen en veiligheidstips:

Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de veiligheidsinformatiebladen. Deze staan op de hieronder genoemde Miele websites ter beschikking.

Voer verpakkingen volledig leeg en afgesloten af. Voor de verwijdering van resthoeveelheden: zie het veiligheidsinformatieblad.

De gegevens uit dit document zijn gebaseerd op de toen beschikbare kennis en ervaring. Dit betekent niet dat de gebruiker geen eigen tests en onderzoeken hoeft uit te voeren. Juridisch bindende garanties ten aanzien van bepaalde eigenschappen kunnen niet uit de gegevens worden afgeleid.

#### Leverbare verpakkingseenheden en toebehoren

Aanduiding	Verpakking	Materiaalnummer
<i>ProCare Dent 30 C</i>	1-l-fles (deksel met vultuit)	9 052 100
<i>ProCare Dent 30 C</i>	Jerrycan van 5 l	9 052 110
Sleutel voor het openen van jerrycans	Voor jerrycans van 5 l en 20 l	11 851 600

#### Contactgegevens:

##### Duitsland

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29,  
D-33332 Gütersloh  
Telefoon +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

##### Nederland

Miele Nederland B.V.  
De Limiet 2  
4131 NR VIANEN  
Telefoon +31 347378911  
info@miele.nl  
www.miele.nl/professional/index.htm

##### België

N.V. MIELE S.A.  
Z.5 Mollem 480  
1730 Mollem  
Telefoon +32 2 4511411  
info@miele.be  
www.miele.be/nl/professional/index.htm



##### Duitsland

Chemische Fabrik  
Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85  
D-20539 Hamburg  
www.drweigert.de